



Montageanleitung
Bitte vor der Montage
aufmerksam lesen !

**Installation
Instructions**
Please read carefully
before setting-up !

Art.-No. 10.10.05



**STATIV
HOME**
für **Q.Light® 70**
Lichttherapiegeräte

Q.Products AG
Säntisstr. 11
9401 Rorschach
Switzerland

Tel. +41 (0) 71 858 20 60
Fax. +41 (0) 71 858 20 61
contact@QProducts.info


**STAND
HOME**
for **Q.Light® 70**
Light therapy devices



1 Anfang

Nehmen sie das komplett zusammengelegte Stativ aus der Verpackung.


Take the folded Stand out of the box.

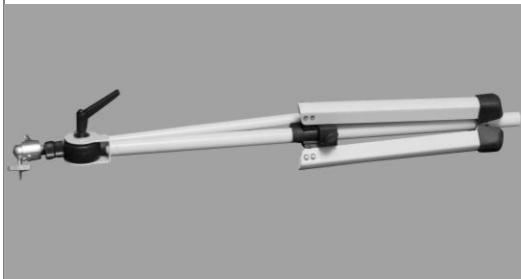

2 Standfüße:

Alle drei Füße bis zum Anschlag ausklappen.

Fold out and position all three legs.

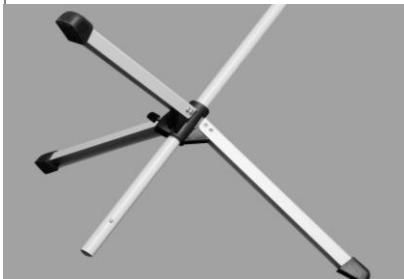

3 Standfüße:

Klemmschraube lösen, Fußelement nach unten zum Rohrende ziehen.

Beachten Sie, dass die am Stativrohr befindliche Schraube in die dazu gehörende Aussparung geführt wird.


Release set screw, pull the legs at based stand down into position. Make sure that the small screw engages into the notch.



Nur so kann das Fußelement ganz nach unten gezogen werden. Klemmschraube festziehen.

! Das Stativ ist nur betriebsbereit, wenn das Standrohr komplett im Fußelement versenkt ist.

! The stand will be only ready-for-use if the base part is fully extended.

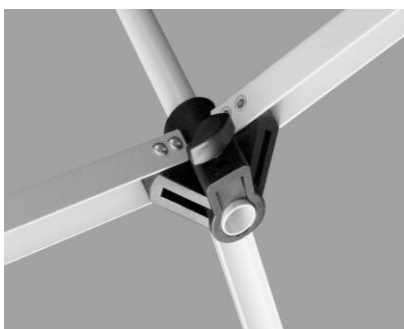

4 Stativarm:

Das Stativ auf einen festen Untergrund stellen.

Place the stand on a firm ground.

! Bitte beachten, dass das Stativ für eine max. Neigung von 5 Grad ausgelegt ist.

! ATTENTION

The stand is only to be used on max. 5 degree Slope.



Klemmhebel lösen, Stativarm positionieren und wieder festziehen.

Release set handle, reposition arm of the stand, then fix handle to lock into position.



Höhe / Hight : 80cm

Arm / Arm : 60 cm

Gewicht / Weight : 1,5 kg

5 Montieren der **Q.Light® 70 Modelle***

Setzen Sie das Gerät auf die Drehhalterung (A) am Stativarm.

Insert by screwing gently the device on the top of the rotating support (A) at the end of the arm.

Mittels drehen der Drehhalterung (A) schrauben Sie das Gewinde (B) im Uhrzeigersinn vollends in die Gewindeaufnahme (C) des Q.Light®-Gerätes ein.


Screw the rotating support (A) to engage the thread (B) clockwise into the thread (C) of the device.

Fixieren Sie das Gewinde mit dem Gabelschlüssel. Hierzu stecken Sie den Gabelschlüssel durch die Bohrung (D) in der Drehhalterung und drehen diese im Uhrzeigersinn gut fest.

Fix the thread with the open end wrench. Put the open end wrench through the boring (D) and turn it clockwise, tighten properly.

Mit der Flügelmutter (E) können Sie die Klemmstärke einstellen.

With the wingnut (E) adjust the clamp strength.

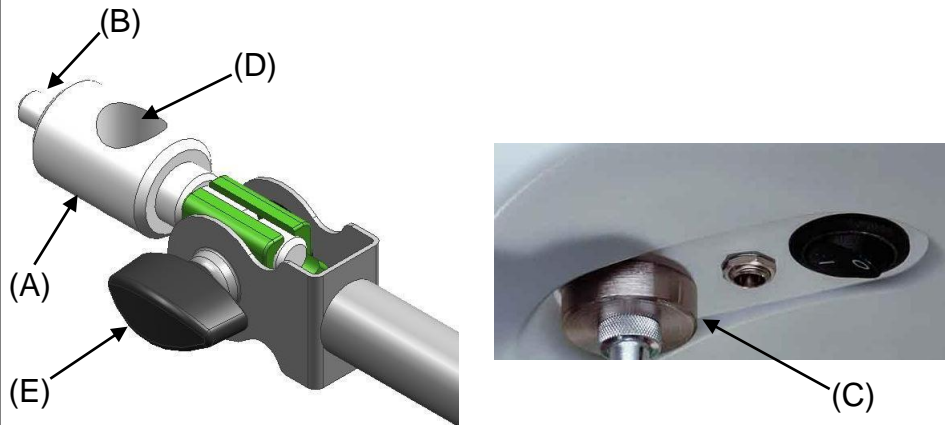

6 Anschließen der **Q.Light® 70 Modelle***

Winkelstecker des Stromkabels in die Anschlussbuchse des Gerätes stecken.

Fix the plug of the transformer into the power socket of the device.



Das Stromkabel mit Hilfe der beiliegenden Kabelklemmen am Stativarm und gegebenenfalls am Stativstandrohr befestigen.

Fix the cable, using the cable clamps provided on the stand tube.



It is complete!!!

Now appreciate the benefits of your **Q.Light®** treatments.

Geschafft!!!

Nun genießen Sie die Behandlungen mit Ihrer **Q.Light®**

* **Q.Light® 70 Modelle:** **Q.Light® ACNE CARE; Q.Light® PAIN CARE; Q.Light® WOUND CARE; Q.Light® SAD CARE; Q.Light® SKIN CARE UNIT**